

Samenvattend aanbevelingen Telemetrie sessie S-ICD Tablet 3200

- Uitvoer van een S-ICD programmering of controle met programmer model 3200.

Gebruikelijke standaard voorzorgsmaatregelen

- Zorg ervoor dat gedurende de implantatie en in-office follow-up tests externe defibrillatie-apparatuur en medisch reanimatiepersoneel aanwezig is en de patiënt niet zonder toezicht wordt gelaten.
- plaats de programmeerkop altijd direct boven de S-ICD en houd zoveel mogelijk afstand tussen willekeurige interferentiebronnen en de programmer en S-ICD.
- beperk de duur van programmercommunicaties tot het minimum en beëindig de telemetriesessie van de programmeer onmiddellijk nadat deze voltooid is.
- informeer de patiënt dat hij of zij contact op moet nemen met de arts als het hulpmiddel pieptonen laat horen.

Additionele werkzaamheden

- Wanneer de S-ICD programmering of controle voltooid is, de S-ICD instellingen bevestigen door de volgende stappen uit te voeren:
 - 1- beëindig de oorspronkelijke telemetriesessie.
 - 2- start een nieuwe telemetriesessie.
 - 3- print een Overzichtsrapport van het device.
 - 4- beëindig de telemetriesessie.
 - 5- bevestig de instellingen van het hulpmiddel: als er instellingen zijn die veranderd zijn ten opzichte van de bedoelde programmering, contact opnemen met Technical Services.

- Gebruik van het LATITUDE patiëntmanagementsysteem voor routine S-ICD beoordelingen kan ongewijzigd doorgang vinden.